



## CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA

Acesse a tela de configurações através do botão "Configurações" da Janela de Captura no Awbook para Windows. Nela, você vai encontrar as seguintes abas:

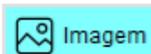

Onde é possível ajustar: Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Cores RGB e também é possível fazer o White Balance que é um ajuste de cores de forma automática.

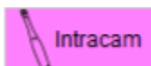

Onde é possível selecionar o tipo de Flash (Branco e/ou Violeta), a intensidade do led branco, focalizar manualmente e também selecionar os diferentes modos de captura. Veja como funciona:

Tirar foto com:



**Flash Branco**

Selecionar a opção "Flash Branco" resulta numa imagem comum.



**Flash Violeta**

Selecionar a opção "Flash Violeta" resulta numa imagem com fluorescência. Selecionar as duas opções resulta em duas fotos seguidas normal e com fluorescência.

Modos de captura:



**Focaliza e captura**

Sua câmera vem programada com o modo de captura Azul. Nele, com um toque no botão touch (superior ou inferior) a câmera focaliza a imagem, captura e armazena.



**Focaliza**

No modo Magenta, com um toque no botão touch (superior ou inferior) a câmera apenas focaliza a imagem. Para capturar e armazenar, dê outro toque de 2 segundos.



**Macro**

No modo Branco, a câmera aproxima a imagem em 50x. Aproxime a câmera do alvo e quando alcançar a nitidez, dê um toque de 2 segundos em um dos botões touch.

Também é possível alterar as opções de flash e os modos de captura manualmente, usando os botões da câmera:

- Flash: toque rapidamente nos dois botões touch ao mesmo tempo para alterar o tipo de flash.
- Modo de captura: mantenha pressionado os dois botões touch ao mesmo tempo e observe a mudança de cor do led indicador de função. Quando alcançar a cor (função) desejada, solte o botão.

## LIMPEZA

Utilize um pano limpo e macio umedecido com álcool 70% (álcool etílico hidratado 70 IMPM) para passar por todo o gabinete da câmera.



Atenção! Não autoclavar. Nunca utilize substâncias químicas como ácidos, mercúrio, amálgamas etc.



Atenção! Envolve a câmera com filme PVC a cada utilização para proteger os pacientes contra contaminação cruzada.

## IMPREVISTOS

Está com dificuldades para utilizar a câmera? Acesse a FAQ no site: [www.activeware.com.br](http://www.activeware.com.br) -> Suporte Ainda com dificuldades? Entre em contato com o Suporte Técnico da Active Ware.



Atenção! Caso o seu computador necessite de ajustes ou consertos, contate um técnico. Caso o seu antivírus bloqueie o funcionamento da câmera, entre em contato com o suporte técnico do antivírus.

## ALERTAS

- Esse equipamento não possui contra indicações e sua vida útil esperada é de 5 anos.
- Se o seu computador estiver no mesmo ambiente que o paciente, ele deve estar em conformidade com a NBR IEC 60601-1. Se estiver fora do ambiente do paciente deve estar em conformidade com a NBR IEC 60950.
- Não utilize um computador com nível de proteção contra choque elétrico Classe 0.
- Evite a proximidade com fontes de radiação eletrostática e eletromagnética.
- Equipamentos que possuem placa de TV ou softwares para webcam podem interferir no uso da câmera



# GUIA RÁPIDO

GR.H5.R02 09/18

AWBOOK

IntraCam H5

**Active Ware Industria Eletronica LTDA**

Rua Teixeira e Souza 211 Barra Funda,

São Paulo/SP

Fone: (11) 3873-7727

WhatsApp: (11) 96708-9874

[suporte@activeware.com.br](mailto:suporte@activeware.com.br)

Esta é uma versão resumida do Manual do Usuário. Baixe e Leia a Versão completa em: [www.activeware.com.br](http://www.activeware.com.br) -> Suporte -> Manuais